

# Qorpus Vita

glidlakan, vätskespär

sanicare   
your daily life



# Qorpus Vita glidlakan med vätskespärr

är ett ergonomiskt hjälpmedel för personer med smärta eller nedsatt rörelseförmåga av någon anledning. Glidlakanet har ett blankt mittparti med mycket låg friktion. Denna glidyta gör det lättare att ändra ställning i sängen – på egen hand eller hjälp av vårdare. När man använder glidlakan underlättas minsta lägesförändring och det medför att blodförsörjningen ökar till utsatta kroppsdelar. Mångårig erfarenhet från vården visar att användning av glidlakan minskar risken för trycksador.




Glidlakanet är ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal, då belastningen på ryggar och axlar minskar. Glidykans låga friktion gör att vändning av patienter kan utföras på ett kraftbesparande sätt för vårdaren och ett skonsamt sätt för patienten. Glidlakanet lämpar sig mycket väl inom t.ex. sjukhusvård, äldreomsorg, gruppboende och hemvård. Även gravida kvinnor och personer med rygg- eller höftproblem har stor nytta av ett glidlakan.

Glidlakanet har ett vätsketätt spärrskikt som skyddar madrassen vid eventuellt läckage.

<b>Varumärke</b>	Qorpus Vita
<b>Benämning</b>	Qorpus Vita glidlakan, vätskespärr
<b>Sanicare art nr</b>	<b>1009010</b>
<b>Totalyta</b>	B200 x L 100 cm
<b>Glidytan</b>	B58 x L100 cm
<b>Färg</b>	Vit/gul
<b>Antal produkter/förpackning</b>	1 st
<b>Rekommenderad sängbredd</b>	80-90 cm
<b>Material:</b>	
<b>Liggyta</b>	100 % Polyester
<b>Spärrskikt</b>	Polyuretan
<b>Bäddflikar</b>	50 % Bomull, 50 % Polyester
<b>Tvättråd</b>	<p>Vid avförings- eller blodfläckar bör iakanet snarast sköljas i kallt vatten. Använd ej sköljmedel.</p>
<b>Antal tvättar</b> (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 200 st
<b>Kasseras</b>	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur
<b>Övriga information</b>	Produkten innehåller inte PVC. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

## Bruksanvisning/ monteringsanvisning

- Glidlakanet bäddas in med hjälp av bäddflikar. Bäddflikarna håller glidet på plats.
- Glidytan bäddas uppåt. Det glider bra i sidled men bromsas upp av ett strävare material på sidorna,
- Glidstoppet placeras så att patienten inte riskerar att glida ur sängen. Bädda så att glidstoppet är minst 10-12cm från sängens vardera ytterkant. Därmed förhindras att brukaren sätter sig på sängkanten och glider ner på golvet.

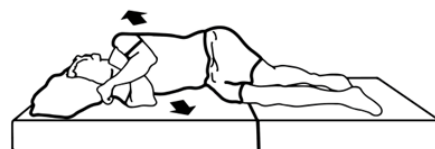

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**

\*Certifikat nr står på produkten



Sanicare Hjälpmedel AB  
Box 260  
311 23 Falkenberg

SWEDISH  
**Medtech**



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

**MD**

**CE**



**REF**

Art.nr.  
1009010

**sanicare**  
your daily life

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se