

# Absorba

Lakansskydd Eldner

**sanicare**   
*your daily life*




# Lakansskydd Eldner

är ett lakansskydd för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage.

Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck. Bädda alltid in bäddflikarna under sängen för bästa komfort och säkerhet.




Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba Lakansskydd Eldner
Sanicare art nr	1169
Totalyta	B190 x L85 cm
Absorberande yta	B90 x L85 cm
Sängbredd	90 cm
Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015	1865 ml
Antal produkter/förpackning	1 st
Material liggyta Material Absorptionsskikt Material spärrskikt Material bäddflikar	50 % Bomull, 50 % Polyester 95 % Polyester, 5 % Rayon Polyuretan 65 % Polyester, 35 % Bomull
Tvättråd	 Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet snarast sköljas i kallt vatten
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 450 st
Kasseras	Textilåtervinning alt. Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkten innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

## Bruksanvisning och råd vid användning

- Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med den gröna sidan mot madrassen.
- Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används.
- Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens bredd.

**Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta eller lyfta brukare med!**

 Sanicare AB  
Box 260  
311 23 Falkenberg

 SWEDISH  
**Medtech**



Art.nr.  
1169

 **OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
\*Certifikat nr står på produkten



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta/positionera brukare med! Det finns en risk för att brukaren kan falla ur sängen om en förflyttning ändå görs! Bädda alltid in bäddflikarna. Observera! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med.

Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

**sanicare**  
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se