

MerryPoke

pet-emot-kant

sanicare 
your daily life



MerryPoke pet-emot-kant

är en hjälp till dem som har svårt att få upp maten på gaffeln eller skeden med en hand.

MerryPoke pet-emot-kant är tillverkad av mjukfjädrande polypropenplast som kan återvinnas. Den passar till de flesta flata tallrikar upp till yttermättet av 27 cm Ø.

Diska alltid produkten innan första användning i varmt vatten.



Bruksanvisning och råd vid användning:

- Diska alltid produkten innan första användning i varmt vatten.
- Montera MerryPoke på en flat tallrik genom att placera de tre hakarna runt tallrikskanten. (För att underlätta montering, spola produkten i varmt vatten.)
- Lägg upp den mat som skall ätas.
- Använd pet-emot-kanten som hjälp med att få upp maten på gaffeln eller skeden med en hand.

Varumärke	MerryCare	
Benämning	MerryPoke pet-emot-kant	
Sanicare art nr	145041	145041R
Färg	Vit	Röd
Material	Polypropen	
Rengöring	Tål diskmaskin (max 84 grader)	
Kasseras	Sorteras och återvinns efter lokal anvisning	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.	



Sanicare Hjälpmedel AB
Box 260
311 23 Falkenberg



Se till att produkten är hel. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Art.nr.
145041,
145041R



sanicare
your daily life

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se