

MerryFoot

Fotvagga

sanicare 
your daily life



MerryFoot fotvagga

ger stöd och avlastning för underbenen och fot.
Fotvaggan har en stomme av trä och är polstrad och klädd med vinröd galon.



Varumärke	MerryCare
Benämning	MerryFoot fotvagga
Sanicare art nr	145437
Antal produkter/förpackning	1 st
Vikt per produkt	2,2 kg
Mått	B30 x L55 x H36 cm
Mått på fotplattan	B30 x L23 cm
Mått på benplattan	B30 x L37 cm
Material	Stommen i Björk, klädsel i galon
Rengöring	Rengörs med en fuktig trasa och torkas därefter ordentligt torr
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling

Bruksanvisning och råd vid användning

MerryFoot placeras framför en stol, en fätölj eller liknande. Lägg upp det ben som skall avlastas på vaggan.

Monteringsanvisning

- Benplatta
- Fyra skruvhål för benplattan
- Fotplattan
- Fyra skruvhål för fotplattan



1. Montera benplattan (a) på medarnas längre del (b) med de medföljande skruvarna. Använd insexnyckel (e). Dra inte fast skruvarna helt.
2. Montera den mindre fotplattan (c) på medarnas kortare del (d) med de medföljande skruvarna. Använd insexnyckel (e). Dra åt skruvarna helt.
3. Därefter kan skruvarna på benplattan (b) dras åt helt.

Sanicare Hjälpmedel AB
Box 260
311 23 Falkenberg

SWEDISH
Medtech



Art.nr.
145437



Observera! När fotvaggan ej används - ställ den på en plats så att den står säkert - utan risk för att någon snubblar över den. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

sanicare
your daily life

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se