

MerryWalk

rullbord

sanicare 
your daily life



MerryWalk rullbord är ett hjälpmedel för att enkelt kunna ta med sig olika tillhörigheter t.ex. glas, termoskanna, koppar och brödfat och är avsett för inomhusbruk. MerryWalk har en ram av epoxilackerade stålrör med bordsskiva och undre hyllplan i boklaminat. Handtagens höjd kan ställas i 7 fasta lägen. Rullbordet är försett med fyra länkhjul varav de två bakre är låsbara. Man låser hjulen genom ett enkelt tryck med foten på den svarta pedalen på hjulet. För att låsa upp, tryck den svarta pedalen uppåt med ovansidan av foten.



Rullbordet ska inte användas som gånghjälpmedel eller rullator. Man skall alltså inte luta sig mot det eller lägga sin tyngd mot på handtaget utan Merrywalk rullbord är enbart ett hjälpmedel till att förflytta föremål med genom att rulla bordet framför sig. Merrywalk rullbord skall heller inte användas av personer med nedsatt rörelseförmåga.

Varumärke	MerryCare
Benämning	MerryWalk rullbord
Sanicare art nr	148525
Antal produkter/förpackning	1 st
Höjd upp till brickan	72 cm
Höjd upp till handtagen	75-105 cm
Mått på bricka	B42 x L50 cm
Material	Stomme: Vit epoxilackerade stålrör Hyllplan: Bok Handtagen: Gummi
Tillbehör/reservdel	Avlastn.skiva/övre art.nr.148525/3 Låsbart hjul art.nr. 148525/5 Gummihandtag art.nr. 148525/6 Ej låsbart hjul art.nr. 148525/7 Broms art.nr 101
Rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa
Rengöring mellan brukare	Rengör med desinfektionsmedel med >40% isopropylalkohol
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkten innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.



Kontrollera rullbordet regelbundet. Rullbordet skall kasseras och tas ur bruk om det är defekt, har synliga skador eller är utslitet vilket kan medföra risk vid användning. Produkten är inte avsedd att användas som ett gånghjälpmedel eller rullator. Var uppmärksam på trösklar, mattkanter eller andra ojämna underlag eller kanter. Var noga med att hjulen är låsta när vagnen står stilla. Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemiddelsverket.



Sanicare Hjälpmedel AB
Box 260
311 23 Falkenberg



Art.nr.148525,1458
525/3,148525/5,148
525/6, 48525/7, 101



Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se