

# Isbrodd

krona och pigg

**sanicare**   
your daily life




**Isbrodd** är ett tillbehör till kryckor eller käppar vid vinterväglag. Välj mellan två olika utformande; krona eller pigg. Piggan rekommenderas vid tjockt packad snö medans kronan rekommenderas vid ishalka.



### Bruksanvisning

- Innan användning kontrollera att låsmekanismen fungerar
- Skruva ut de två skruvarna på var sin sida (Bild 1)
- Placera isbrodden på röret och kronan ner mot doppskon.
- Se till att kronan sluter tätt mot doppsko
- Skruva därefter i skruvarna så att de kommer på framsidan av kryckan/käppen (i gångriktning). Om diameter är större använd de längre medskickade skruvarna.
- När isbrodden inte skall användas, tryck då in de båda vita plastdeljerna på var sin sida (bild 2).
- Därefter kan man enkelt fälla upp isbrodden om man inte längre har behov av den.
- Samma enkla tillväga gångsätt gäller när man fäller ner isbrodden

<b>Benämning</b>	Isbrodd krona	Isbrodd pigg
<b>Sanicare art nr</b>	<b>1718</b>	<b>1719</b>
<b>Max diameter på kryckan rör</b>	17-23 mm	
<b>Material</b>	Kromad stål	Rostfritt stål
<b>Regelbunden rengöring</b>	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa.	
<b>Kasseras</b>	Sorteras efter lokal anvisning.	
<b>Övriga information</b>	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.	

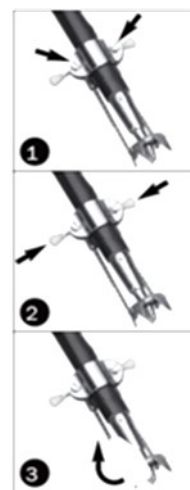

Ossenberg GmbH  
Kanalstrasse 79  
DE-48432 Rheine  
Tel +49(0)5971-980460



Art.nr. 1718, 1719



Sanicare Hjälpmedel AB  
Skreavägen 15  
311 44 Falkenberg



Kontrollera regelbundet att isdubben sitter korrekt och att inga skruvar är lösa. Se till att dra åt alla skruvar ordentligt efter monteringen.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

**sanicare**  
your daily life

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se