

# Isbrodd

krona och pigg

**sanicare**   
your daily life




**Isbrodd** är ett tillbehör till kryckor eller käppar vid vinterväglag. Välj mellan två olika utformande; krona eller pigg. Piggan rekommenderas vid tjockt packad snö medans kronan rekommenderas vid ishalka.



### Bruksanvisning

- Innan användning kontrollera att låsmekanismen fungerar
- Skruva ut de två skruvarna på var sin sida (Bild 1)
- Placera isbrodden på röret och kronan ner mot doppskon.
- Se till att kronan sluter tätt mot doppsko
- Skruva därefter i skruvarna så att de kommer på framsidan av kryckan/käppen (i gångriktning). Om diameter är större använd de längre medskickade skruvarna.
- När isbrodden inte skall användas, tryck då in de båda vita plastdetaljerna på var sin sida (bild 2).
- Därefter kan man enkelt fälla upp isbrodden om man inte längre har behov av den.
- Samma enkla tillväga gångsätt gäller när man fäller ner isbrodden

<b>Benämning</b>	Isbrodd krona	Isbrodd pigg
<b>Sanicare art nr</b>	<b>1718</b>	<b>1719</b>
<b>Max diameter på kryckan rör</b>	17-23 mm	
<b>Material</b>	Kromad stål	Rostfritt stål
<b>Regelbunden rengöring</b>	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa.	
<b>Kasseras</b>	Sorteras efter lokal anvisning.	
<b>Övriga information</b>	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.	

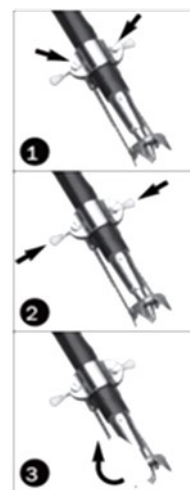

**Ossenberg GmbH**  
Kanalstrasse 79  
DE-48432 Rheine  
Tel +49(0)5971-980460



Art.nr. 1718, 1719



**Sanicare Hjälpmedel AB**  
Skreavägen 15  
311 44 Falkenberg



Kontrollera regelbundet att isdubben sitter korrekt och att inga skruvar är lösa. Se till att dra åt alla skruvar ordentligt efter monteringen.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

**sanicare**  
your daily life

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se