

# Armbågs-krycka

rakt, mjukt, färgat rör

sanicare   
your daily life



**Armbågskrycka** är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.

Hög maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalitet på ingående material och reflex både bak och fram för ökad säkerhet. Mellan rören sitter en låsring som säkerställer en klickfri gång.

Materiallet i underarmsstödet består av 15 % glasfiber som gör plastdelen mer flexibel vid temperaturväxlingar samt minskar obehagligt tryck om individen har bredare underarmar eller tjockare kläder som t ex vinterjacka. Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp.



<b>Benämning</b>	Armbågskrycka, rakt, mjukt, färgat rör
<b>Sanicare art nr</b>	<b>220dsfsw</b>
<b>Färg handtag</b>	Svart
<b>Monterad isdubb</b>	Nej
<b>Längd på krycka</b>	76-96 cm
<b>Vikt per produkt</b>	0,60 kg
<b>Färg rör</b>	Svart
<b>Max brukarvikt</b>	140 kg
<b>Tillbehör –Rekommenderad doppsko</b>	Doppsko rekommenderas med 16 mm i Ø, t.ex. 716 + färgkod
<b>Material</b>	
<b>Platsdelar</b>	Polypropen med glasfiber
<b>Handtag</b>	Termoplastisk gummi
<b>Rör</b>	Aluminium
<b>Rengöring</b>	
<b>Regelbunden Mellan brukare</b>	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa. Kan autoklaveras 85°C max 3 min. Eller desinfektionsmedel.
<b>Kasseras</b>	Sorteras efter lokal anvisning.
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur
<b>Övriga information</b>	Produkt innehåller inte PVC eller Latex.  Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.
<b>Garanti</b>	Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att kryckan har använts på ett korrekt sätt och för sitt ändamål samt att leverantörens original delar har använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger ansvaret för användandet av kryckan hos användaren.



Ossenberg GmbH  
Kanalstrasse 79  
DE-48432 Rheine  
Tel +49(0)5971-980460



Art.nr. 220dsfsw



Kontrollera kryckan regelbundet. Kryckan skall kasseras och tas ur bruk om den är defekt, har synliga skador, är utsliten eller glappar i höjdjusteringen vilket kan medföra risk vid användning.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Sanicare Hjälpmedel AB  
Skreavägen 15  
311 44 Falkenberg



Reg.-Nr.: MQ 0115318

**sanicare**  
your daily life



Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se