



## Armbågskrycka klassiker S lång 105 cm

**OBS! Läs anvisningarna noga innan kryckan tas i bruk!**

Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute. Hög Maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalitet på ingående material, reflex både bak och fram för ökad säkerhet samt stor variation på modeller inom sortimentet. Mellan rören sitter en låsring som säkerställer en klickfri gång. Materialet i underarmsstödet består av 15% glasfiber som gör plastdelen mer flexibel vid temperaturväxlingar samt minskar obehagligt tryck om individen har bredare underarmar eller tjockare kläder som tex vinterjacka. Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp.

### Produktinformation, bruksanvisning och teknisk information Avser 2012 års modell och senare

Benämning	Armbågskrycka klassiker S lång 105 cm
Sanicare Hjälpmedel art nr	2201Ksw
Handtag, modell	Rakt
Färg på handtag	Svart
Längd, cm	105
Tjocklek rör mm	20
Vikt, kg	0,55
Max brukarvikt, kg	140
Diameter Doppsko, mm	19
Latex	Innehåller EJ latex
Material, plastdel	Polyamid
Material, rör	Aluminium
Material doppsko	Naturgummi
Art nr Reservdel Doppsko	719sw
Regelbunden rengöring	Milt rengöringsmedel och en mjuk trasa
Rengöring mellan brukare	Autoklaver 85 grader max 3 minuter. Desinfektionsmedel Incidin Liquid (reflexerna skall endast rengöras med varmt vatten)



Livslängden på våra kryckor är tre år. Kryckorna bör kasseras 3 år efter tillverkning (datum framgår på kryckans etikett). Kryckorna skall även tas ur bruk om den är defekt, har synliga skador, utsliten eller glappar i höjjusteringen vilket kan medföra risk vid användning



Reg.-Nr.: MQ 0115318



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ossenberg GmbH  
Kanalstrasse 79  
DE-48432 Rheine  
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB  
Skrevägen 15  
311 44 Falkenberg



SWEDISH  
**Medtech**



## Sanicare Hjälpmedel AB

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39  
Email. sanicare@sanicare.se, Hemsida. www.sanicare.se



## Bruksanvisning

### Armbågskrycka klassiker S lång 105 cm

**OBS! Läs anvisningarna noga innan kryckan tas i bruk!**

**Avser 2012 års modell eller senare**

Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute. För rätt användning av kryckan skall längden justeras till individuell längd.

**Justering av höjd** Tryck in knappen som fixerar de båda rören, dra därefter isär eller skjut ihop rören till önskad längd. Lås sedan rören genom att matcha de två bulthålen och se till att tryckknappen snäpper på plats igen.

**OBS! Kontrollera alltid att rören är fixerade genom att försöka rotera eller flytta rören!**

**Hur kryckan används är beroende på individuella behov och gångförmåga, utprovning/justering skall ske i samråd med kunnig personal som har kunskap om produkten och dess funktion i olika situationer för bästa möjliga resultat.**

**Max Brukarvikt 140 kg**

- Använd alltid stödet på motsatt sida av den skadade eller svaga sidan.
- Håll kryckan nära kroppen och luta den inte utåt,
- Placera kryckan så rakt mot marken som möjligt. så att den inte glider iväg
- När du går skall kryckan placeras så upprätt som möjligt på marken.
- Sätt inte kryckan för långt bort från kroppen. Du riskerar då att ramla.
- När du sitter bör du använda stolar med armstöd så att när du ställer dig upp kan du använda armstödet som stöd.
- Om möjligt bör kvalificerad personal visa dig hur man går uppför trappor med kryckor
- När du går i en trappa med en krycka bör du hålla ledstången med den lediga handen.
- När du går i en trappa med två kryckor, ta kryckorna i en hand och använd ledstången som stöd.
- Håll kryckan i ett stadigt och omslutande grepp i handtaget.
- Välj en sko med låg och stadig klack så att benet klarar den extra vikten bättre.
- Användning av kryckor kan ge tryck i händerna eller belastning på armar och axlar, var därför noga med att vila ofta.
- Tryckmärken eller skavsår kan uppstå på händer armar eller kläder och som förebyggande åtgärd rekommenderar vi att man använder polstring på handtag samt vaddering av armbygel.
- Ta om möjligt hjälp av en medföljande person som du kan luta dig mot och som kan ta emot dig om du ramlar.
- Om du ändå ramlar. Låt om möjligt kryckorna falla från kroppen så att du inte faller på dem!

### Justering av höjden på kryckan




Höjden av kryckan justeras med hjälp av tryckknappen. Tryck in knappen och drag i det undre röret till önskad längd. Efter justering av höjden är det viktigt att tryckknappen är fixerad i de båda rören avsedda hål och att tryckknappen är helt ute efter justering.

Alla skruvfästen måste dras åt ordentligt innan användning.

## Sanicare Hjälpmedel AB



**Varning! Trappor utan ledstång utgör en ökad risk för fall och stor försiktighet bör iakttas när du går i en sådan trappa!**

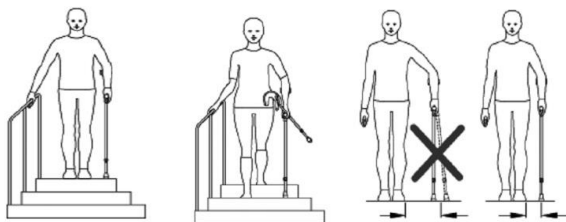

### Säkerhetsföreskrift

Produkten skall enbart användas till avsedd användning och föreskrifter enligt nedan skall följas!

- Utprovning/justering skall ske i samråd med personal som har kunskap om produkten och dess funktion. Felaktigt justerad krycka begränsar användningsområdet samt kan leda till en ökad felbelastning och i värsta fall en säkerhetsrisk!
- Max brukarvikt får ej överskridas.
- Kryckan skall användas i original utförande för att garanti skall gälla samt original-reservdelar/tillbehör.
- Handtaget får ej belastas med kassar el dyl.
- Kryckan får ej användas till att lyfta med, trycka på knappar osv
- Gör en regelbunden kontroll av kryckorna och om det finns yttre skador rådgör med en specialist. Sneda eller skadade kryckor får ej användas då de har en sämre stabilitet. Kryckan skall under dessa omständigheter ej lagas utan bytas ut!
- Regelbunden kontroll av doppskon, defekt doppsko skall bytas ut mot original doppsko. Kontrollera att doppskon är fri från smuts för ett säkert grepp mot underlaget.
- OBS! Risk för sämre grepp och risk för halka vid våta och fuktiga underlag; löv, grus etc. Även fuktiga golv innebär risk för halka!
- Ojämnheter och hål i underlag är mycket farliga eftersom kryckan kan glida iväg eller sjunka. Var extra försiktig vid dålig belysning!
- Löst liggande mattor eller dyl. kan glida iväg och orsaka olyckor!
- Vid justering av höjden är det viktigt att tryckknappen är fixerad i de båda rörens hål och att tryckknappen är helt ute efter justering.
- Alla skruvfästen måste dras åt ordentligt innan användning.
- Undvik snö eller is om din krycka inte är utrustad med doppskor för vinterbruk eller har en monterad isbrodd.
- Vid vinterväglag finns separat isbrodd art nr 1719 (en pigg) och 1718 (hel krona) som tillbehör.



Vår original-doppsko är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet. Den har också ett skålat stålslag för att minska risken för att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av kryckan.

**OBS!!** Då du behöver använda kryckor eftersom din vanliga rörlighet är nedsatt, även om kryckorna hjälper dig i den här situationen bör du alltid tänka på att din grundläggande rörlighet fortfarande är nedsatt. Var alltid medveten om detta och var alltid försiktig när du använder kryckor.

## Sanicare Hjälpmedel AB



- Regelbunden rengöring av kryckan med ett mildt medel samt mjuk trasa. Rengöring mellan brukare rekommenderas autoklaver 85 grader max 3 minuter eller desinfektionsmedel Incidin Liquid (reflexerna skall endast rengöras med varmt vatten)
- **Handtag samt doppsko får inte rengöras med oljiga ämnen pga halkrisk!**
- Regelbunden kontroll av kryckan skall göras och skadad eller söndrig krycka skall kasseras.

### Garanti

Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att kryckan har använts på ett korrekt sätt och för sitt ändamål samt att leverantörens originaldelar har använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger ansvaret för användandet av kryckan hos användaren.


### Tillbehör och monteringsanvisning av tillbehör

Benämning	Isbrodd	
Art nr	1718	1719
Utförande	Krona	Pigg
Diameter på rör, mm	17-23	
Material	Metall	
Tvätt/rengöring	Milt rengöringsmedel och en mjuk trasa	



Isbrodden monteras enkelt med hjälp av 2 skruvar.

När isbrodden inte skall användas, tryck då in de båda plastdetaljerna på var sin sida (enligt bild).

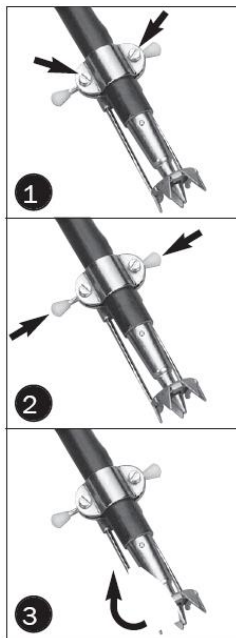

- Skruva ut de två skruvarna på var sin sida (Bild 1)
- Placera isbrodden på röret och kronan ner mot doppskon.
- Se till att kronan sluter tätt mot doppskon.
- Skruva därefter i skruvarna så att de kommer på framsidan av kryckan/käppen (i gångriktning). Om diameter är större använd de medskickade skruvarna som är längre.
- När isbrodden inte skall användas, tryck då in de båda vita plastdetaljerna på var sin sida (bild 2).
- Därefter kan man enkelt fälla upp isbrodden om man inte längre har behov av den.
- Samma enkla tillvägagångssätt gäller när man fäller ner isbrodden

## Sanicare Hjälpmedel AB



**Reservdel: Doppsko med stålslag**

**OBS! Läs anvisningarna noga innan doppskon tas i bruk!**

Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet och med ett skålat stålslag för att minska risken för att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av krycka

**Monteringsanvisning:** Sliten eller skadad doppsko skall bytas ut för att öka säkerheten vid användning. Välj en doppsko som har ca 1-2 mm mindre innerdiameter än vad kryckans nedre rör är i diameter. Detta för att doppskon skall fixera säkert och inte ramla av vid användning

Demontera den slitna doppskon, gör rent röret och applicera den nya doppskon. Stöt kryckan lätt mot golvet för att fixera doppskon mot rörets nedre kant.

<b>Benämning</b>	Doppsko 19mm
<b>Sanicare art nr svart</b>	719sw
<b>Storlek innerdiameter, mm</b>	19
<b>Material</b>	Naturgummi
<b>Regelbunden rengöring</b>	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa. Kan autoklaveras 85°C, max 3 min
<b>Kasseras</b>	Sorteras efter lokal anvisning
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur
<b>Övriga information</b>	Produkt innehåller inte PVC

