

# Sanicare

Pantergrepp

Polstring

**sanicare**   
*your daily life*



**Pantergrepp** är en polstring som används främst till kryckkäppar med rakt handtag. En polstring används av personer som av någon anledning behöver använda klassiska kryckkäppar som har ett standardhandtag.

Polstringen är utformat som ett rör och är uppslitsat med invändiga remsor av dubbelhäftande tejp. Rörets längd är 228 mm och kan lätt kapas till lämplig längd.

Greppet är starkt, smidigt, mjukt och vattenavstötande, det kan tvättas av och har lång livslängd.



<b>Varumärke</b>	Sanicare	
<b>Benämning</b>	Pantergrepp	
<b>Sanicare art nr</b>	<b>5702</b>	<b>5703</b>
<b>Antal produkter/</b>	1 st	32 st
<b>Vikt per produkt</b>	23,2 g	
<b>Längd</b>	228 mm	
<b>Material</b>	Nitrilgummi	
<b>Rengöring</b>	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa	
<b>Tillbehör</b>	Produkten är ett tillbehör till klassiska	
<b>Kasseras</b>	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning	
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur	
<b>Övriga information</b>	Produkten innehåller inte Latex eller PVC. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.	

#### Bruksanvisning och råd vid användning

- Klipp av Pantergreppet till önskad längd (en längd räcker till två kryckhandtag),
- Dra bort skyddspapperet på tejprensorna och fäst greppet där du vill att det ska sitta.
- När det sitter som du vill ha det trycker du fast det ordentligt genom att gnida hårt några gånger fram och tillbaka på Pantergreppet.



Produkten skall endast användas för avsett ändamål. Produkten skall regelbundet kontrolleras och en defekt produkt skall kasseras. Kontrollera att produkten sitter fast ordentligt.. Ha ej blöta eller kladdiga händer – risk för att halka ur greppet.

Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemiddelsverket.



Sanicare Hjälpmedel AB  
Box 260  
311 23 Falkenberg



Art.nr. 5702, 5703



**sanicare**  
your daily life

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se

2020-10-27