

Doppsko

16 mm

sanicare 
your daily life



Doppsko med stålinlägg är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet och med ett skålat stålinlägg för att minska risken att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av krycka eller stödkäpp.



Monteringsanvisning: Välj en doppsko som har ca 1-2 mm mindre innerdiameter än vad kryckans nedre rör är i diameter. Detta för att doppskon skall fixeras säkert och inte ramla av vid användning. Demontera den slitna doppskon, gör rent röret och applicera den nya doppskon. Stöt kryckan lätt mot golvet för att fixera doppskon mot rörets nedre kant.

Säkerhetsföreskrift: Regelbunden kontroll av doppskon, defekt doppsko skall bytas ut mot original doppsko. Kontrollera att doppskon är fri från smuts för ett säkert grepp mot underlaget.

OBS! Risk för sämre grepp och risk för halka vid våta och fuktiga underlag; löv, grus etc. Även fuktiga golv innebär risk för halka! Ojämnheter och hål i underlag är mycket farliga eftersom kryckan kan glida iväg eller sjunka. Var extra försiktig vid dålig belysning!

OBS! Artikel 716 Passar endast till kryckor/käppar som är 17mm i diameter Ø

Benämning	Doppsko, 16 mm			
Sanicare art nr	716sw	716bl	716gr	716ge
Färg	Svart	Blå	Grå	Gul
Storlek innerdiameter	16 mm			
Material	Rågummi			
Regelbunden rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa.			
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.			
Förvaring	Rumstemperatur			
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.			



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Art.nr. 716sw, 716bl,
716gr, 716ge



Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Reg.-Nr.: MQ 0115318



Sliten eller skadad doppsko skall bytas ut för att öka säkerheten vid användning.

Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

sanicare
your daily life

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se