



Doppsko med stålinlägg

OBS! Läs anvisningarna noga innan doppskon tas i bruk!

Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet och med ett skålat stålinlägg för att minska risken att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av krycka eller stödkäpp.

Monteringsanvisning: Välj en doppsko som har ca 1-2 mm mindre innerdiameter än vad kryckans nedre rör är i diameter. Detta för att doppskon skall fixeras säkert och inte ramla av vid användning. Demontera den slitna doppskon, gör rent röret och applicera den nya doppskon. Stöt kryckan lätt mot golvet för att fixera doppskon mot rörets nedre kant.

Sliten eller skadad doppsko skall bytas ut för att öka säkerheten vid användning.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Sanicare art nr | 719sw |
| Färg | Svart |
| Storlek innerdiameter | 19 |
| Material | Rågummi |
| Regelbunden rengöring | Milt rengöringsmedel och mjuk trasa |
| Kasseras | Sorteras efter lokal anvisning |
| Förvaring | Rumstemperatur |
| Övriga information | Produkt innehåller inte PVC |

Säkerhetsföreskrift:

- Regelbunden kontroll av doppskon, defekt doppsko skall bytas ut mot original doppsko.
- Kontrollera att doppskon är fri från smuts för ett säkert grepp mot underlaget.
- OBS! Risk för sämre grepp och risk för halka vid våta och fuktiga underlag; löv, grus etc. Även fuktiga golv innebär risk för halka!
- Ojämnheter och hål i underlag är mycket farliga eftersom kryckan kan glida iväg eller sjunka. Var extra försiktig vid dålig belysning!
- OBS! Artikel 719 Passar endast till kryckor/käppar som är **20mm i diameter Ø**



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg

