



## Lyds Höftskyddsbyxa

Lyds höftskyddsbyxa tas på som vanliga underkläder.

Byxan är bekväm att bära och kan användas både dag och natt, detta är en fördel eftersom de flesta fallen inträffar på kvällen och morgonen oftast i samband med toalettbesök.

Höftskydden skall placeras i fickorna på båda sidor av höften, inläggen syns ej och deformeras inte.

Höftskydds-inläggen är tillverkade av ett material som heter SAND och har ursprungligen utvecklats av NASA, som en del av det stötdämpande material som används till rymdfärjorna.

SAND är ett tunt och mycket flexibelt material som i dess förbättrade form anpassar sig till vår kroppsform på ett smart och hudvänligt sätt och reducerar kraften vid fall med ca 60%.

Kliniska tester har visat att risken för höftledsfrakturer minskar med upp till 80% vid användande av höftskyddsbyxor.



**OBS!** Ta alltid ur skydden innan tvätt av höftskyddsbyxorna – får ej tvättas i tvättmaskin.

Höftskydden är lätta att avlägsna före tvätt av byxan. Inläggen torkas av med tvållösning.

Benämning	Höftskyddsbyxa				
Varumärke	Lyds				
Sanicare art nr	87013	87023	87033	87043	87053
Storlek	S (36-38)	M (40-42)	L (42-44)	XL (46-48)	XXL (50-52)
Höftmått, cm	85-95	95-105	105-115	115-130	130-145
Antal produkter/fp, st	3 byxor och 2 höftskydd				
Material, byxan	95% bomull, 5% elastan				
Material, höftskydd	SAND				
Tvättråd					
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt)				
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning				
Förvaring	Rumstemperatur				
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC, inläggen <b>skall</b> tas ur innan tvätt				

Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Vid sprickor eller skador på skyddet skall det kasseras.

**CE**  
Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Tillverkare:  
Comfortable Ned BV  
Burghornlaan 14  
1705 BK Heerhugowaard  
Tel: +31(0)251 – 268025

**EC REP**  
Sanicare AB  
Skravägen 15  
311 44 Falkenberg

