

Sanifix benfixering

för urinpåse

sanicare 
your daily life



Sanifix benfixering är avsedd för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar. Fixering för urinpåse passar både höger och vänster ben och kan fixeras på låret eller vaden. För fixering vid underbenet lämpar sig dom mindre storlekarna bäst. Produkten är färgkodad.



Bruksanvisning:

Storleken mäts runt låret alternativt vaden. Rätt storlek är viktig för att få önskad effekt och att urinpåsen skall sitta på plats även då påsen är full. Placera urinpåsen i den sydda fickan med avrinningsröret genom öppningen i fickans underkant.

OBS! Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion.

| Varumärke | Sanifix | | | | | |
|--------------------|---|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Benämning | Sanifix benfixering för urinpåse | | | | | |
| Sanicare art nr | 9100 | 9101 | 9102 | 9103 | 9104 | 9105 |
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Färgkod | Röd | Gul | Blå | Brun | Grön | Vit |
| Mått benöppning | 20-30 cm | 24-39 cm | 36-55 cm | 40-70 cm | 65-95 cm | 75-105 cm |
| Vikt/produkt | 12 g | 15,5 g | 22 g | 26 g | 30 g | 33g |
| Antal/förpackning | 3 st | | | | | |
| Material | 76 % Polyester, 24 % Spandex | | | | | |
| Tvättråd | | | | | | |
| Antal tvättar | Ca 25 st (normal hushållstvätt) | | | | | |
| Kasseras | Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning. | | | | | |
| Förvaring | Rumstemperatur | | | | | |
| Övriga information | Produkten innehåller inte PVC, Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling. | | | | | |

Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme

Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg

CE MD REF Art.nr. 9100-9105



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
*Certifikat nr står på produkten



Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se