



## Doppsko med stålslag

Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet och med ett skålat stålslag för att minska risken för att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av krycka

Monteringsanvisning: Sliten eller skadad doppsko skall bytas ut för att öka säkerheten vid användning. Välj en doppsko som har ca 1-2 mm mindre innerdiameter än vad kryckans nedre rör är i diameter. Detta för att doppskon skall fixera säkert och inte ramla av vid användning

Demontera den slitna doppskon, gör rent röret och applicera den nya doppskon. Stöt kryckan lätt mot golvet för att fixera doppskon mot rörets nedre kant.



**OBS! Passar endast till kryckor/käppar som är 23 mm i diameter Ø.**

<b>Benämning</b>	Doppsko med stålslag
<b>Sanicare art nr</b>	949P
<b>Färg</b>	Grå
<b>Storlek innerdiameter, mm</b>	22
<b>Material</b>	Naturgummi
<b>Regelbunden rengöring</b>	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa.
<b>Kasseras</b>	Sorteras efter lokal anvisning
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur
<b>Övriga information</b>	Produkt innehåller inte PVC



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ossenberg GmbH  
Kanalstrasse 79  
DE-48432 Rheine  
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB  
Skeavägen 15  
311 44 Falkenberg



**OBS! Passar endast till kryckor/käppar som är 23 mm i diameter Ø.**  
Risk för sämre grepp och för halka vid vått och fuktigt underlag så som löv, grus, fuktiga golv etc!



Reg.-Nr.: MQ 0115318

