

Doppsko

22 mm

sanicare 
your daily life



Doppsko med stålinlägg är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet och med ett skålat stålinlägg för att minska risken för att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av krycka



Monteringsanvisning: Sliten eller skadad doppsko skall bytas ut för att öka säkerheten vid användning. Välj en doppsko som har ca 1-2 mm mindre innerdiameter än vad kryckans nedre rör är i diameter. Detta för att doppskon skall fixera säkert och inte ramla av vid användning. Demontera den slitna doppskon, gör rent röret och applicera den nya doppskon. Stöt kryckan lätt mot golvet för att fixera doppskon mot rörets nedre kant.

OBS! Passar endast till kryckor/käppar som är 23 mm i diameter Ø.

Benämning	Doppsko, 22 mm
Sanicare art nr	949p
Färg	Grå
Storlek innerdiameter	22 mm
Material	Naturgummi
Regelbunden rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa.
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB
Skrevavägen 15
311 44 Falkenberg



OBS! Passar endast till kryckor/käppar som är 23 mm i diameter Ø.

Risk för sämre grepp och för halka vid vått och fuktigt underlag så som löv, grus, fuktiga golv etc!

Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

sanicare
your daily life

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se