




## Doppsko Flexyfoot

Flexyfoot ger bättre grepp och stabilitet på alla underlag, särskilt på hala och ojämna ytor och har ett patenterade luftfjädringsteknik och är som en stötdämpare för kryckor och käppar och som ger ett bättre grepp och minskar risken för halkolyckor.

Produktens stötdämpningsförmåga minskar belastningen på händer, armar och axlar. Dessutom ger 360° rotation ett maximalt stöd och minskar vridningar av handleden. Flexyfoot kan ersätta en traditionell doppsko och fäster bra på alla underlag. Produkten är tillverkad av ett speciellt gummi och lämnar inte svarta märken på golvet, som vanliga doppskor annars kan göra. Lätt att rengöra. Utformad för att hålla stenar och lera borta.

**OBS! Kan ej kombineras med isdubb artnr 1718, 1719**

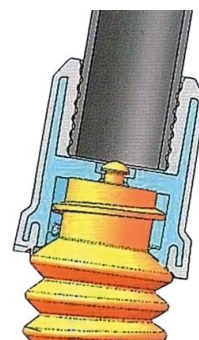

Sanicare art nr	97716P-1
Benämning	Flexyfoot doppsko
Färg	Svart / orange
Storlek innerdiameter, mm	16
Max brukarvikt / produkt, kg	130
Material	Gummi
Regelbunden rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ossenberg GmbH  
Kanalstrasse 79  
DE-48432 Rheine  
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel  
ABSkreavägen 15  
311 44 Falkenberg



Reg.-Nr.: MQ 0115318

# sanicare

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39  
Email. [sanicare@sanicare.se](mailto:sanicare@sanicare.se), Hemsida. [www.sanicare.se](http://www.sanicare.se)



## Flexyfoot bruksanvisning

Läs och behåll dessa instruktioner

- Bättre grepp på de flesta underlag för att förhindra halka och fallolyckor.
- Unik luftfjädringsteknik som gör att den böjer sig för att ge full kontakt med marken.
- 360° rotation ger maximalt stöd och minskar vridningar av handleden
- Stötdämpande att minska värk och smärta som beror på belastning och påverkan på lederna.
- Passar kryckor och käppar med diameter 16 mm.
- Flexyfoot består av två delar.

## Montering av Flexyfoot

- Mät diametern på ditt gånghjälpmedel med den bifogade guiden på för att få rätt storlek på Flexyfoot (1)
- Korta längden på ditt gånghjälpmedel med cirka 35 mm för att behålla samma höjd på handtaget, de flesta hjälpmedel är justerbara (2)
- Om du måste såga av ditt gånghjälpmedel för att få korrekt längd, fila ner om det är några vassa kanter innan du monterar Flexyfoot (3)
- För att separera foten från hylsan, dra ut foten från hylsan tills det klickar och sedan skruva loss foten (4)
- Sätt en markering 33 mm från slutet av ditt gånghjälpmedel (5) Sätt stödet i hylsan och tryck hårt. Se till att märket är i nivå med hylsan. Om det är mycket snävt, fukta kryckan/käppen med lite vatten.
- Skruva "foten" i "hylsan" tills det roterar fritt och tryck sedan på "foten" tills det klickar på plats (6)

## Byte av "fotdelen"

- Ersätt "fotdelen" när slitbanan är nedsliten till "bär markörerna" (7) eller om den är skadad
- Ta bort den gamla eller skadade "fotdelen" genom att bara skruva loss (8) och montera sedan in den nya "fotdelen". Skruva tills den roterar fritt och sedan tryck tills det klickar på plats.

## Flexyfoot tillbehör


**Flexyfoot extra** för en aktiv full viktbelastning av gånghjälpmedelet. Lägg de två ringarna som medföljer i förpackningen mellan skärorna på bälgen (9). Detta ger större långtidsbeständighet

**Flexyfoot Ice Boot** Den nya Ice Boot med rostfria ståltänder ger extra grepp i snö eller is (10). Levereras med en skyddskåpa för montering och inomhusbruk. Köpes separat.

## Varning!

- Maximal användarvikt: 130kg.
  - Flexyfoot är lämplig för de flesta människor och i de flesta miljöer, Produkten är endast avsedd att användas på kryckor eller stödkäppar. Greppet på underlaget påverkas av olika underlag, vilket typ av hjälpmedel man använder och hur det används. Extra försiktighet bör iaktas i våta och hala förhållanden.
  - Kontrollera regelbundet slitage och byt ut när slitbanan är nedsliten till "bär markörerna" (7). Byt omedelbart om slitbanan eller "bälg" är skadade, eller om "fotdelen", "bälg" eller stöd är lös i hylsan
  - Använd alltid rätt storlek på doppskon.
- För din hjälp. Följ guiden på förpackningen eller besök [www.flexyfoot.com/customer-service/buyers-guide](http://www.flexyfoot.com/customer-service/buyers-guide)
- Byt ut hylsan med var tredje gång som du byter ut byte fotdelen.
  - Bälgen kommer att mjukna efter en kort tid och kommer att minska i höjd med cirka 6 mm.
  - För rengöring, använd endast tvålsvatten.

Använd ej produkten om den sitter löst. Om foten blir sliten, skadad eller inte sitter fast ordentligt i hylsan skall den genast bytas ut.

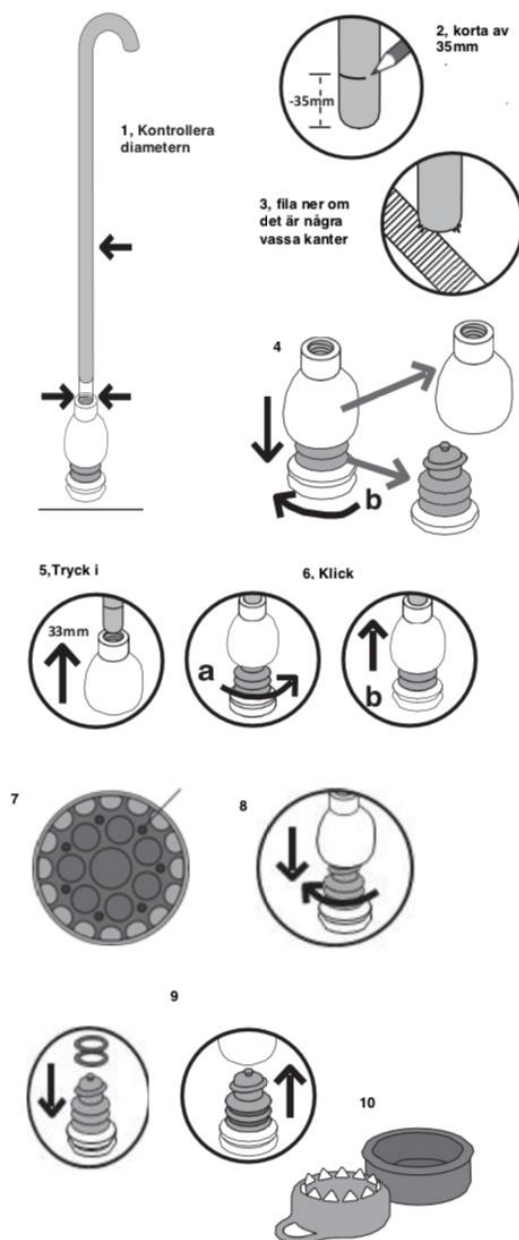

sanicare