

Badshorts, manet

3-16 år

sanicare 
your daily life




Badshorts är en badbyxa för barn mellan 3-16 år med inkontinens. Badbyxorna är unika på grund av att man inte behöver ett extra inkontinensskydd i badbyxan.



"Två i ett"- yttertyget på badkläderna är som en vanlig badbyxa men med inbyggda innerbyxor som har ett vattentätt tyg, gjorda av andningsbar PU-belagd polyester. Yttertyget är gjort av 100 % polyester för att uppnå en mjuk och smidig komfort. Badshortsen har justerbara band på benmuddarna för att kunna få en praktisk och snygg passform och är enkla att spänna åt.

Tyget är klorbeständigt och har optimal andningsförmåga och är snabbtorkande med UPF 50+.

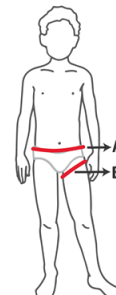


OBS! För att kunna uppnå en fullgod funktion utan läckage är det viktigt att man mäter noggrant samt att spänna åt de justerbara banden noggrant. Ta hjälp av figuren nedan, hur du ska mäta och jämför dina mått mot tabellen. Mät med hjälp av ett måttband. Tänk på att hålla måttbandet sträckt när du mäter.

Varumärke	Kes-Vir™						
Benämning	Badshorts, 3-16 år, manet						
Sanicare art nr	9791	9792	9793	9794	9795	9796	9797
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11-12 år	13-14 år	15-16 år
Mått midja	44-58 cm	48-61 cm	51-64 cm	54-68 cm	57-72 cm	60-78 cm	63-82 cm
Mått ljumske	26-34 cm	28-37 cm	30-40 cm	33-43 cm	36-46 cm	38-48 cm	40-50 cm
Antal prod/förp	1 st						
Material	Yttertyg: 100 % Polyester Innertyg: PU-belagd 100% Polyester.						
Krympning	<5 %						
Tvättråd							
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning						
Förvaring	Rumstemperatur, ej i solljus						
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.						

 Incy Wincy LTD
9 Trafford Road
RG1 8JP Berkshire

 SWEDISH
Medtech

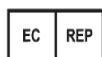

Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelverket. Tillverkaren finner ni på produktbladet.

sanicare
your daily life 

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se