

Badshorts

snörning i midjan, blå

sanicare 
your daily life




Badshorts med snörning i midjan är badbyxor som passar både män och kvinnor med inkontinens. Badshortsen är unika på grund av att man inte behöver ett extra inkontinensskydd i badbyxan.



”Två i ett”- ytteryget på badkläderna är som en vanlig badbyxa men med inbyggda innerbyxor som har ett vattentätt tyg, gjorda av andningsbar PU-belagd polyester. Ytteryget är en blandning av polyamid micro/lycra för att uppnå en mjuk och smidig komfort. Badbyxans underdel har justerbara band på benmuddarna för att kunna få en praktisk och snygg passform och är enkla att spänna åt.

Tyget är klorbeständigt och har optimal andningsförmåga och är snabbtorkande med UPF 50+.

OBS! För att kunna uppnå en fullgod funktion utan läckage är det viktigt att man mäter noggrant samt att spänna åt de justerbara banden noggrant. Ta hjälp av figuren nedan, hur du ska mäta och jämför dina mått mot tabellen. Mät med hjälp av ett måttband. Tänk på att hålla måttbandet sträckt när du mäter.

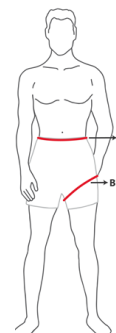

Varumärke	Kes-Vir™				
Benämning	Badshorts snörning i midjan, blå				
Sanicare art nr	9881	9882	9883	9884	9885
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Mått midja	71-87 cm	81-97 cm	91-107 cm	102-117 cm	112-127 cm
Mått ljumske	40-56 cm	46-62 cm	52-68 cm	58-74 cm	64-80 cm
Antal prod/förp	1 st				
Material	Ytteryg: 79% Polyamid Micro 21% Xtra Life LYCRA® Innertyg: PU-belagd 100% Polyester.				
Krympning	<5 %				
Tvättråd					
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning				
Förvaring	Rumstemperatur, ej i solljus				
Övrig information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.				

Incy Wincy LTD
9 Trafford Road
RG1 8JP Berkshire



EC REP

Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg

SWEDISH
Medtech



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemiddelsverket. Tillverkaren finner ni på produktbladet.

sanicare
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se