

## Bilaga

### Armbågsstycka Flick B

### Armbågsstycka standard lång 88-108 cm

**OBS! Läs anvisningarna noga innan kryckan tas i bruk!**

#### Produktinformation

Armbågsstycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.

Fördel: Hög Maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalitet på ingående material, reflex både bak och fram för ökad säkerhet samt stor variation på modeller inom sortimentet.



#### Teknisk information

|                            | <b>Armbågsstycka standard</b>  |
|----------------------------|--|
| Sanicare Hjälpmedel art nr | 230DKUsw   |
| Färg                       | Svart  |
| Handtag                    | Standard   |
| Längd cm                   | 88-108   |
| Tjocklek rör över/under    | 23/20  |
| Vikt, kg                   | 0,7  |
| Brukarvikt kg              | 150  |
| Latex                      | Innehåller EJ latex  |
| Material, plastdel         | Polyamide(PA6)   |
| Material, rör              | Aluminium  |
| Material doppsko           | Naturgummi   |
| Regelbunden rengöring      | Milt rengöringsmedel och en mjuk trasa                               |
| Rengöring mellan brukare   | Autoklaver 85 grader max 3 minuter eller desinfektionsmedel Terralin |



## Sanicare Hjälpmedel AB

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39  
Email. [sanicare@sanicare.se](mailto:sanicare@sanicare.se), Hemsida. [www.sanicare.se](http://www.sanicare.se)

### Säkerhetsföreskrift

Produkten skall enbart användas till avsedd användning och föreskrifter enligt nedan skall följas!

- Utprovning/justering skall ske i samråd med personal som har kunskap om produkten och dess funktion. Felaktigt justerad krycka begränsar användningsområdet samt kan leda till en ökad felbelastning och i värsta fall en säkerhetsrisk!
- Max brukarvikt får ej överskridas.
- Kryckan skall användas i original utförande för att garanti skall gälla.



- Handtaget får ej belastas med kassar el dyl.
- Kryckan får ej användas att lyfta med, trycka på knappar osv

- Regelbunden kontroll av doppskon, defekt skall bytas ut mot original, samt säkerställa att doppskon är ren från smuts för ett säkert grepp mot underlaget.
- OBS! Risk för sämre grepp och risk för halka vid våta/fuktiga underlag samt löv, grus mm.

- Vid justering av höjden är det viktigt att tryckknappen är fixerad i de båda rörens avsedda hål och att tryckknappen är helt ute efter justering.



- Alla skruvfästen måste dras åt ordentligt innan användning.
- Vid vinterväglag finns det doppskor med inbyggd stålhulling eller separat isbrodd som tillbehör.

- Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet samt med en skålad stålplatta för att minska risken för att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av kryckan.

### Förskrivarinformation

Kryckan är avsedd för individer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar. Kryckan går att anpassa mellan 88-108 cm med 2,5 cm intervall. Justeringen sker enkelt med en tryckknapp. Mellan rören sitter en låsring som säkerställer en klickfri gång. Handtaget består av 15 % glasfiber som gör plastdelen med flexibel vid olika temperaturväxlingar samt minskar obehagligt tryck om individen har bredare underarmar. Max brukarvikt 150 kg. Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp.

## Sanicare Hjälpmedel AB

## Bilaga


### Bruksanvisning

För rätt användning av kryckan skall längden justeras till individuell längd.

Tryck in knappen som fixerar de båda rören, dra därefter isär eller skjut ihop rören till önskad längd. Lås sedan rören genom att matcha de två bulthålen och se till att tryckknappen snäpper på plats igen.

**OBS! Kontrollera alltid att rören är fixerade genom att försöka rotera eller flytta rören! Hur kryckan används är beroende på individuella behov och gångförmåga, kunnig personal kan ge råd i användning i olika situationer samt utprovning för bästa möjliga resultat.**

- Använd alltid stödet på motsatt sida av den skadade eller svaga.
- När du går i en trappa med två kryckor, ta kryckorna i en hand och använd ledstängens som stöd.
- Håll kryckan nära kroppen och luta den inte utåt och så rakt mot marken som möjligt.
- Håll kryckan med stadig hand i handtaget.
- Välj en sko med låg och stadig klack.
- Användning av kryckor kan ge tryck i händerna eller belastning på armar och axlar, var därför noga med att vila ofta.

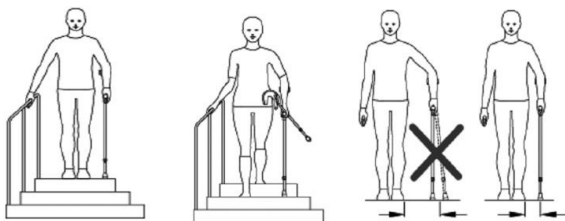

### Förvaring/Rekonditioneringsanvisning:

- Förvara aldrig kryckan i närheten av värme t.ex. ugn, element eller i bilens bakruta.
- Undvik att lägga kryckan ute i solen längre stunder då plasten påverkas negativt.
- Undvik att tappa kryckan.
- Kontrollera regelbundet doppskons kvalitet för att öka användarsäkerheten.
- Under rätt förhållande kan kryckan förvaras upp till 2 år, kontrollera alltid kryckan innan den åter tas i bruk.
- Regelbunden rengöring av kryckan med ett mildt medel samt mjuk trasa. Rengöring mellan brukare rekommenderas autoklaver 85 grader max 3 minuter eller desinfektionsmedel Terralin.
- **Handtag samt doppsko får inte rengöras med oljiga ämnen pga halkrisk!**
- Regelbunden kontroll av kryckan skall göras och skadad eller söndrig krycka skall kasseras.

## Sanicare Hjälpmedel AB

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39  
Email. [sanicare@sanicare.se](mailto:sanicare@sanicare.se), Hemsida. [www.sanicare.se](http://www.sanicare.se)

## Bilaga

### Kort information:

Utprovning/justering skall ske i samråd med personal som har kunskap om produkten och dess funktion. Felaktigt justerad krycka begränsar användningsområdet samt kan leda till en ökad felbelastning och i värsta fall en säkerhetsrisk! Max brukarvikt får ej överskridas.

För rätt användning av kryckan skall längden justeras till individuell längd.

Tryck in knappen som fixerar de båda rören, dra därefter isär eller skjut ihop rören till önskad längd. Lås sedan rören genom att matcha de två bulthålen och se till att tryckknappen snäpper på plats igen.

**OBS! Kontrollera alltid att rören är fixerade genom att försöka rotera eller flytta rören!**

- Använd alltid stödet på motsatt sida av den skadade eller svaga.
- Håll kryckan nära kroppen och luta den inte utåt och så rakt mot marken som möjligt.
- Välj en sko med låg och stadig klack.

### Garanti:

Garanti-2 år under förutsättning att kryckan har använts på ett korrekt sätt och ändamål. Därefter ligger ansvaret för användandet av kryckan hos användaren.

### Tillverkare:

Ossenberg GmbH

[www.ossenberg.com](http://www.ossenberg.com)

+49(0)59 71 -9 80 46 0

## Sanicare Hjälpmedel AB

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39

Email. [sanicare@sanicare.se](mailto:sanicare@sanicare.se), Hemsida. [www.sanicare.se](http://www.sanicare.se)