

# Saniform

herr nr. 1-5

sanicare   
*your daily life*



**Saniform herr nr. 1-5** passar till män med urinläckage. Skyddet har en limsträng för fixering och bör fixeras med en stadig fixeringsbyxa eller tätsittande kalsong. Saniform Herrskydd innehåller superabsorbenter som håller störande lukt borta.



Skyddet är ett engångsskydd klätt med en ovävd textil som gör skyddet mjukt och behagligt. Under ytskiktet finns ett spridningsskikt som har till uppgift att sprida vätskan och hålla ytan torr. Längst in finns högabsorberade material som både suger upp och binder vätskan effektivt.

Varumärke	Saniform				
Benämning	Saniform herr nr. 1	Saniform herr nr. 2	Saniform herr nr. 3	Saniform herr nr. 4	Saniform herr nr. 5
Sanicare art nr	<b>2730</b>	<b>2720</b>	<b>2700</b>	<b>2725</b>	<b>2710</b>
Mått	B7,5-12 x L14 cm	B8-13 x L14 cm	B9-13 x L14 cm	B7-16 x L14 cm	B7-12 x L15 cm
Antal produkter/förpackning	30 st	30 st	25 st	25 st	40 st
Antal produkter/ transportförpackning	120 st	120 st	100 st	100 st	160 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	175 ml	234 ml	308 ml	327 ml	345 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	58,3 ml	78 ml	102,6 ml	109 ml	115 ml
Vikt/produkt	8 g	11 g	16 g	11 g	14 g
Absorptionsmaterial	Termobunden fluffmassa, superabsorbenter				
Ytskikt	Non-woven av polypropylen				
Spärrskikt	Polyeten				
Förvaring	Rumstemperatur				
Kassering	Brännbart avfall. Får <b>ej</b> spolas ner i toaletten				
Övrigt	Produkten innehåller inte PVC. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.				

#### Bruksanvisning och råd vid användning:

- Produkten fästs i kalsong/fixeringsbyxa med hjälp av klisterremsan. Avlägsna skyddsremsan och applicera skyddet.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.
- Användarinstruktioner på tejp remsan och på innerförpackningen underlättar och ger en bra användarinstruktion för brukaren.
- Singelförpackad



Sanicare AB  
Box 260  
311 23 Falkenberg

SWEDISH  
**Medtech**



Vid sårig eller infekterad hud skall skyddet bytas vid varje läckagetillfälle. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger eld/hög värme.

Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemiddelsverket.



Art.nr.  
2700 -  
2730



**sanicare**  
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se