



## Novo-cup

Novo-cup är designad för att man ska kunna dricka när man ligger ner i en säng eller för personer med Parkinsons.

Tack vare designen behöver inte vårdgivare lyfta eller stödja vårdtagarens huvud när denne skall dricka i sängen.



### Bruksanvisning

Novo-cup rymmer 250ml vätska och kan diskas i diskmaskin. Muggen tål temperaturer mellan -21 grader till 100 grader. Detta betyder att muggen tål att värmas upp i micro under en kortare tid och i jämn temperatur.

Observera att det inte är lämpligt att ha vegetabiliska oljor i muggen.

<b>Benämning</b>	<b>NOVOcup</b>
<b>Varumärke</b>	Sanicare
<b>Sanicare art nr</b>	<b>VR9980</b>
<b>Färg</b>	Transparent mugg/vitt lock
<b>Volym</b>	250 ml
<b>Material</b>	Polypropen
<b>Regelbunden rengöring</b>	Tål maskindisk (100 grader)
<b>Kasseras</b>	Sorteras efter lokal anvisning
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur
<b>Övriga information</b>	Produkt innehåller inte PVC



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:  
Rika Plast A/S  
Sauntebygade 12-  
DK-3100 Hornbæk  
Denmark



Tvätta produkten innan användning med varmt vatten och diskmedel eller i diskmaskin.

Se till att produkten är hel. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.




Sanicare AB  
Skrevägen 15  
311 44 Falkenberg

**sanicare**  
*your daily life*

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39  
Email. [sanicare@sanicare.se](mailto:sanicare@sanicare.se), Hemsida. [www.sanicare.se](http://www.sanicare.se)



## Säkerhetsföreskrifter Novo-cup:

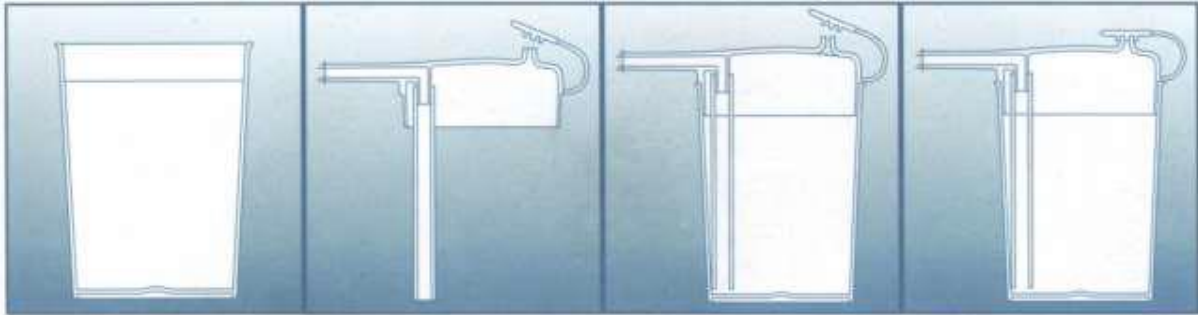

- Se till att sugröret sitter ordentligt i drickslocket före användning
- Se till att glaset är helt utan skarpa kanter
- Tryck locket tätt i glaset med båda händerna
- Lämna inte locket på när du har glaset i mikrougnen eller i frysen
- Stäng "proppen" före användning

**sanicare**   
*your daily life*

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39  
Email. [sanicare@sanicare.se](mailto:sanicare@sanicare.se), Hemsida. [www.sanicare.se](http://www.sanicare.se)